




Dräger DrugCheck 3000

Speekseldrugstest

Met de DrugCheck 3000 weet u binnen enkele minuten of een persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare resultaten. De non-invasieve drugstest heeft geen elektriciteit nodig en is dus overal inzetbaar.

Dräger DrugCheck 3000

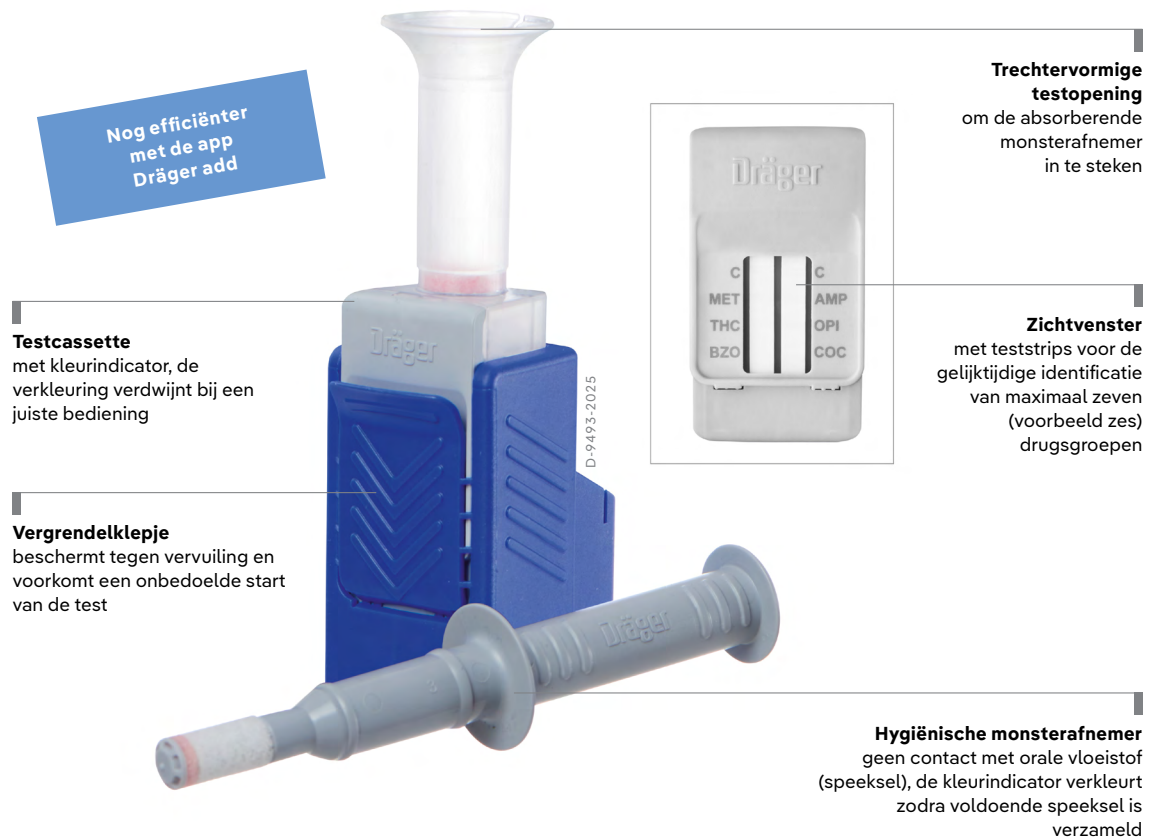

Voordelen

Drugstest - eenvoudige en veilige monsternamen

De DrugCheck 3000 bestaat uit twee componenten: een hygiënische monsterafnemer voor het afnemen van een speekselmonster en een testcassette voor de analyse. De testcassette bevat een ampul met buffervloeistof en een zichtvenster met twee teststrips, die de controle- en testlijnen tonen. De drugstest zelf wordt uitgevoerd in drie eenvoudige stappen: neem met het staafje een speekselmonster af, schud de testkit en start na een korte pre-incubatietijd de test. De kleurindicator op het staafje verdwijnt zodra voldoende speeksel is opgenomen voor een test.

In geval van een negatief testresultaat verschijnt een lijn naast de betreffende stofklasse (drug). Zodra de lijnen in het zichtvenster verschijnen, kunt u de resultaten aflezen. Dit betekent dat de geteste substanties niet zijn aangetroffen in het monster. Als er geen lijn naast een stofklasse (drug) verschijnt, is het resultaat voor deze substantie positief.

Snelle en sensitieve analyse

Met de DrugCheck 3000 testkit kunt u de testpersoon op maximaal zeven stofklassen (drugs) tegelijk testen. Afhankelijk van de uitvoering kan de test de volgende 7 drugs/drugsgroepen detecteren: cocaïne, opiaten, amfetamine, methamfetamine/designerdrugs (bijv. Ecstasy, MDMA), benzodiazepinen (bijv. in medicijnen), oxycodon en cannabis (THC). Van alle genoemde stofklassen is cannabis de meest gebruikte drug, maar tevens ook de moeilijkst te detecteren stof (THC = delta-9-tetrahydrocannabinol). Dit is de reden dat de DrugCheck 3000 specifiek voor de detectie van THC geoptimaliseerd is met twee meetopties: afhankelijk van de gekozen wachttijd (pre-incubatie) van de test is er een snelle modus met een hogere of een sensitieve modus met een lagere THC-detectiegrens (cut-off). De gehele drugstest duurt slechts 3 tot 5 minuten.

Eenduidige drugsdetectie op locatie

Dankzij het uiterst compacte ontwerp kan de DrugCheck 3000 eenvoudig worden vervoerd. Hij is snel en eenvoudig klaar voor gebruik en flexibel inzetbaar, zoals bij verkeerscontroles en het testen op werkplekken waar veiligheid van belang is. De DrugCheck 3000 is bedoeld voor forensische toepassingen, maar ook voor gebruik door leken en op de werkplek. Neem voor het beoogde gebruik de lokale en nationale voorschriften in acht. De testkit heeft geen elektrische of metalen onderdelen en kan daardoor veilig worden gebruikt in elke omgeving.

Overige voordelen

Dräger heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van alcoholmeetapparatuur en drugsdetectiemethoden. Voor de DrugCheck 3000 gebruikt Dräger het testprincipe van het bewezen DrugTest 5000 systeem, dat betrouwbaar zelfs zeer geringe hoeveelheden THC detecteert. De DrugCheck 3000 testkit voor éénmalig gebruik kan niet worden gemanipuleerd en is bijzonder hygiënisch in gebruik.


Voordelen

Ga digitaal: drugsdetectie is nu nog makkelijker en efficiënter met

Dräger add

Vereenvoudig het documentatieproces van uw drugs- en/of alcoholtest met Dräger add. Scan, registreer en archiveer uw testresultaten in slechts enkele stappen met de mobiele app. De app kan aan uw behoeften en processen worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk om statistieken van de geregistreerde testgegevens te bekijken, klantspecifieke pdf-testrapporten te exporteren en afdrukken te maken met behulp van de Mobile Printer BT. De Dräger add app is beschikbaar voor Android- en iOS-besturingssystemen. De testgegevens kunnen door geautoriseerde gebruikers altijd en overal automatisch vanaf hun mobiele apparaat worden geüpload en centraal worden opgeslagen. De webapplicatie biedt beheermogelijkheden voor alle testgegevens, inclusief analysetools zoals een heatmap, diverse grafieken en filteropties. Meer gedetailleerde informatie over specifieke tests en hun status is te vinden op de detailpagina, die een uitgebreid overzicht van de testactiviteiten biedt.

Details

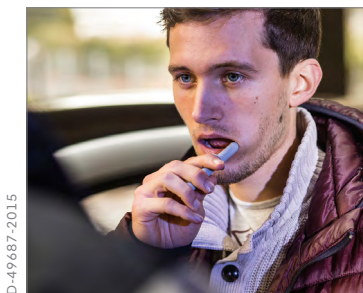

1. Neem een speekselmonster met de monsterafnemer



2. Steek de monsterafnemer in de trechteropening



3. Schud de testkit



4. Start de testanalyse




5. Lees de testresultaten af



6. Verhoog de efficiëntie met onze modulaire softwareoplossing: 'Dräger add'

Onderhoud en reparaties

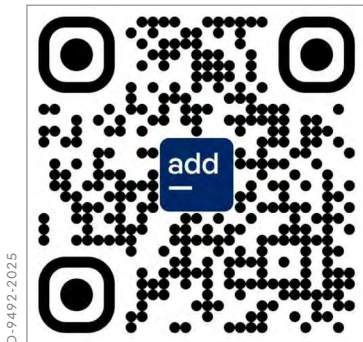

Download-link voor Dräger add

Scan de QR-code om Dräger add direct gratis te downloaden in de Google Play Store of Apple App Store.

Verwante producten

D-54720-2012



Dräger DrugTest 5000

Niet pipetteren, niet morsen, niet timen: een drugstest uitvoeren met de Dräger DrugTest 5000 is snel en eenvoudig. Het speekselmonster kan direct worden geanalyseerd – voor een betrouwbaar resultaat ter plaatse.

D-6296-2009



Dräger SSK 5000

Het Dräger SSK 5000 monsterverzamelsysteem is ideaal voor het testen van oppervlakken op de aanwezigheid van drugs en is snel en eenvoudig te gebruiken. Bij gebruik in combinatie met de Dräger DrugTest 5000 kan het monster naar een testcassette worden overgebracht en op een mogelijke verontreiniging met drugs worden gecontroleerd. Het monster kan ook worden bewaard en worden vervoerd voor verder onderzoek.

ST-13225-2007



Dräger DCD 5000

Eenvoudige, snelle en veilige detectie van verdovende middelen en drugs: De Dräger DCD 5000 is niet alleen in staat speekselmonsters (orale vloeistof) gemakkelijk te verzamelen, u kunt de monsters ook opslaan en voor analyse naar het laboratorium opsturen – zonder dat het monster onderweg wordt beïnvloed.

D-15278-2017



Dräger SCK

De SCK-confirmatieset bevat twee monsterafnemers en stabilisatoren (isopropanol), evenals documentatieformulieren en verzendmaterialen, waarmee een bewakingsketen (chain of custody) wordt gewaarborgd door middel van duidelijke documentatie en veilige verzending van de monsters naar het laboratorium.

Technische gegevens

Test voor de detectie van drugs in speeksel

Afmetingen (b x h x d)	32 x 111 x 57 mm 1,26 x 4,37 x 2,24 inch
Gewicht	< 30 g
Temperatuurbereik	In bedrijf: 5 °C tot 40 °C bij 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid
Opslag / transport	+4 °C tot +25 °C
Duur van de meting	Snelle meting: analyse < 3 minuten Sensitieve meting: analyse < 5 minuten
Selecteren van de meetmodus	Afhankelijk van de gekozen pre-incubatietijd en de gewenste THC-gevoeligheid (cut-off) een snelle of meer sensitieve meting.

Bestelinformatie

DrugCheck 3000 Test voor de detectie van drugs in speeksel	Beschrijving	Bestelnummer
DrugCheck 5-Panel	Verpakkingseenheid 20 sets	8325580
De DrugCheck 5-Panel detecteert de volgende stofklassen (drugs): • Cocaïne (COC) • Opiaten (OPI) • Cannabis (THC) • Amfetamine (AMP) • Methamfetamine (MET)		
DrugCheck 6-Panel BZO	Verpakkingseenheid 20 sets	8327960
De DrugCheck 6-Panel Benzodiazepinen detecteert de volgende stofklassen (drugs): • Cocaïne (COC) • Opiaten (OPI) • Cannabis (THC) • Amfetamine (AMP) • Methamfetamine (MET) • Benzodiazepinen (BZO)		
DrugCheck 6-Panel BZO Singlepack	Verpakkingseenheid 1 set	3727400
De DrugCheck 6-Panel Benzodiazepinen detecteert de volgende stofklassen (drugs): • Cocaïne (COC) • Opiaten (OPI) • Cannabis (THC) • Amfetamine (AMP) • Methamfetamine (MET) • Benzodiazepinen (BZO)		
DrugCheck 6-Panel OXY	Verpakkingseenheid 20 sets	3711990
De DrugCheck 6-Panel Oxycodon detecteert de volgende stofklassen (drugs): • Cocaïne (COC) • Opiaten (OPI) • Cannabis (THC) • Amfetamine (AMP) • Methamfetamine (MET) • Oxycodon (OXY)		
DrugCheck 7-Panel	Verpakkingseenheid 20 sets	3722343
De DrugCheck 7-Panel detecteert de volgende stofklassen (drugs): • Cocaïne (COC) • Opiaten (OPI) • Cannabis (THC) • Amfetamine (AMP) • Methamfetamine (MET) • Oxycodon (OXY) • Benzodiazepinen (BZO)		

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Hoofdkantoor

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
■ www.draeger.com

Nederland

Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
☎ +31 (0)79 344 46 66
✉ receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.

Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
☎ +31 (0)10 295 27 40
✉ sales-mo.sd.nl@draeger.com

België

Dräger België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
☎ +32 2 462 62 11
✉ +32 2 609 52 60
✉ stbe.info@draeger.com



Vind uw account manager op:
www.draeger.com/contact